



products catalog
catálogo de productos

biodinâmica[®]
respect for you



ORTHODONTICS ORTODONCIA

05 biofix
orthoprotect



BLEACHING AGENTS BLANQUEAMIENTO DENTAL

06 biodam
claridex endo

07 claridex office 35%
claridex 10% - 16% - 22%
claridex day 6% - 7,5%



GLASS IONOMERS IONÓMEROS DE VIDRIO

14 ionofast

15 bioglass
resiglass



DISPOSABLE DESECHABLES

21 sterilization reel
rollo de esterilización
disposable trays
cubetas desechables

22 master brush
disposable bibs
baberos desechables
disposable bibs slim
baberos desechables slim

23 articulating carbon paper
papel carbono para articular
abrasive polyester strip
tira de poliéster
abrasive steel strips
tiras de acero



MOLDING MOLDEADO

28 qualitygel



RESTORATION RESTAURACIÓN

08 bioplic
filltemp
ghf

09 master fill
master flow

10 master bond DE
biocal



INDIRECT RESTORATION RESTAURACIÓN INDIRECTA

16 provioplast

17 provitemp
attaque F
silano

18 master cement dual

19 master cement try in
master cement lc



SURGERY CIRUGÍA

24 alveolex



RESTORATION RESTAURACIÓN

11 evicárie
calcium hydroxide p.a
hidróxido de calcio p.a
attaque gel

12 bioforty
zinc oxide
óxido de zinc

13 eugenol
interim kit
varnal



GINGIVAL RETRACTION RETRACCIÓN GINGIVAL

20 retractive
hemostank
retraflex



PREVENTION PREVENCIÓN

25 cariestop
biophat

26 bioseal self cured
bioseal autopolimerizable
bioseal light cured
bioseal fotopolimerizable
sodium bicarbonate
bicarbonato de sodio

27 eviplac
pumice powder
piedra pómez
frutti-fluor gel



ENDODONTICS ENDODONCIA

29 hydrosealer

30 hydropast / hydropast+i
clorexoral

31 tricresolformalina
paramonoclorofenol
endo ptc



ENDODONTICS ENDODONCIA

32 formocresol
iodoform
yodoform
edta gel

33 edta trissodic
edta trisódico
pulp fill kit

34 n-rickert kit
eucaliptol
citrol

Index Índice

biodinâmica[®]
respect for you



BIOFIX

Light-cured Orthodontic Adhesive

Adhesivo de Ortodoncia Fotocurado

- Indicated for the fixation of aesthetic brackets and metallic brackets on dental enamel;
- Light-cured;
- Contains fluoride;
- Aesthetic;
- Without color variation over time;
- With fluorescence.

Allows identification for removal by fluorescence Permite la identificación para la eliminación por medio de la fluorescencia	Easy to use Fácil de usar.	Preventive action by fluoride Acción preventiva por la acción de fluoruro
Reduction of working time Reducción del tiempo de trabajo	Excellent adhesive strength Excelente fuerza adhesiva	Great consistency Gran consistencia
Light-cured Fotocurable	Aesthetic Estético	

- Indicado para la fijación de los brackets metálicos y estéticos en el esmalte de los dientes;
- Fotocurable;
- Contiene fluoruro;
- Estético;
- No hay cambio de color a lo largo del tiempo;
- Con fluorescencia.



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x syringe with 4g of BIOFIX light cured
+ 1 x syringe with 3g of ATTAQUE GEL
+ accessories.

1 x jeringa con 4g de BIOFIX fotocurable
+ 1 x jeringa con 3g de ATTAQUE GEL
+ accesorios.

• INFORMATION
• INFORMACIONES



ORTHOPROTECT

Protective Coating for Orthodontic Braces

Revestimiento Protector para Dispositivos de Ortodoncia

- Indicated for partial coating of components of orthodontic braces either metallic, ceramic or polymeric (brackets, hooks, threads, etc);
- Used to protect soft tissues (cheeks and tongue) that come in contact with orthodontic braces with sharp and / or acute forms;
- Translucent;
- Low viscosity;
- Light-cured;
- Developed for professional use.
- Indicado para el revestimiento parcial de componentes de aparatos de ortodoncia metálicos, cerámicos o poliméricos (soportes, ganchos, hilos, etc);
- Utilizado para proteger los tejidos blandos (mejillas y lengua) que entran en contacto con dispositivos de ortodoncia con formas agudas;
- Translúcido;
- Baja viscosidad;
- Fotocurable;
- Desarrollado para uso profesional.



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x syringe with 2g of ORTHOPROTECT
+ accessories.

1 x jeringa con 2g de ORTHOPROTECT
+ accesorios.

Does not interfere with the aesthetics of the smile No interfiere en la estética de la sonrisa	More confort for the patient Más comodidad para el paciente	Ideal mechanical characteristics Características mecánicas ideales
Doesn't need primer No hay necesidad de usar primer	Ready to use Listo para usar	Low viscosity Baja viscosidad
Light-cured Fotocurable	Resistant and easy to remove Resistente y fácil de quitar	

• INFORMATION
• INFORMACIONES





BLEACHING AGENTS BLANQUEAMIENTO DENTAL

BIODAM

Light-cured Gingival Barrier

Barrera Gingival Fotocurable

- Used to improve the absolute isolation sealing at cavity procedures and endodontic treatments, also protect the gum against irritant agents, as example bleaching agents;
- Does not irritate the gingival tissue;
- Gingival isolation and protection in procedures that use products that may cause irritation;
- Assists in the sealing of the absolute isolation in cavity preparations and endodontic treatments.
- Puede ser usado para mejorar el vedamiento del aislamiento absoluto en preparos de cavidades y tratamientos de endodoncia, además de proteger las encías de los agentes irritantes como por ejemplo los blanqueamientos;
- No irrita el tejido gingival;
- Protección y aislamiento gingival en procedimientos que utilizan productos que puedan causar irritación;
- Ayuda en el sellado del aislamiento absoluto en preparaciones cavitarias y tratamientos endodónticos.



Green and Blue: color helps the visualization
El color verde y azul: facilita la visualización



Insulator and protector
Aislante y protector



Easy to apply and suitable viscosity
Fácil aplicación y viscosidad ideal



It does not fracture: can be removed completely
No se fragmenta y puede ser removido por entero



It does not irritate the gingival tissue
No irrita el tejido gingival



Excellent sealing power
Excelente poder de sellado



•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 X 2g syringe of BIODAM + accessories.

Shades: Green or Blue.

1 X 2g jeringa de BIODAM + accesorios.

Colores: Verde o Azul.

CLARIDEX ENDO

Bleaching Agent - Sodium Perborate and 20% Hydrogen Peroxide

Agente Blanqueador - Perborato de Sodio y Peróxido de Hidrogenio 20%

- Indication: for internal bleaching of non-vital teeth.
- Indicación para blanqueamiento interno de dientes no vitales.



Internal bleaching of non-vital teeth
Blanqueamiento para dientes no vitales

NaBO₃

Bleaching agent: sodium perborate
Agente de blanqueamiento: perborato de sodio



Easy to apply and suitable viscosity
Fácil aplicación y viscosidad ideal



Slightly alkaline pH
pH levemente alcalino



Powerful and safe
Potente y seguro



Extremely thin granulation
Granulación extremadamente fina



Ease of handling
Facilidad de manipulación



•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 10g flask of CLARIDEX ENDO powder;

1 x 10g flask of CLARIDEX ENDO liquid.

1 x 10g frasco de CLARIDEX ENDO polvo;

1 x 10g frasco de CLARIDEX ENDO líquido.



CLARIDEX OFFICE 35%

Bleaching Agent - Hydrogen Peroxide - Self-mixing system
Agente Blanqueador - Peróxido de Hidrógeno - Sistema de auto-mezcla

- pH between 6.0 to 8.0.
- pH entre 6,0 a 8,0.

Contains desensitizing Contiene desensibilizante	Bleaching agent for vital teeth. Hydrogen peroxide Blanqueamiento para dientes vitales. Peróxido de hidrógeno	Practical and economical Práctico y económico	Fast action 30 to 45 min Acción rápida 30 a 45 min

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 1,2g coupled syringe of CLARIDEX OFFICE 35% + BIODAM.
3 x 1,2g coupled syringes of CLARIDEX OFFICE 35% + BIODAM.
6 x 1,2g coupled syringes of CLARIDEX OFFICE 35% + BIODAM.
1 x 1,2g jeringa acoplada de CLARIDEX OFFICE 35% + BIODAM.
3 x 1,2g jeringas acoplada de CLARIDEX OFFICE 35% + BIODAM.
6 x 1,2g jeringas acoplada de CLARIDEX OFFICE 35% + BIODAM.



• INFORMATION
• INFORMACIONES



CLARIDEX 10% - 16% - 22%

Bleaching Agent - Carbamide Peroxide
Agente Blanqueador - Peróxido de Carbamida

- Neutral pH;
- Yields 7 to 10 applications.
- pH neutro;
- Proporciona desde 7 hasta 10 aplicaciones.

Bleaching agent for vital teeth. Carbamide peroxide Blanqueamiento para dientes vitales. Peróxido de carbamida	Three different concentrations: 10%, 16% and 22% Tres concentraciones: 10%, 16% y 22%	Contains desensitizing Contiene desensibilizante
Practical and economical Práctico y económico	High viscosity, it does not flow at the tray Alta viscosidad, no escurre en la cubeta	Home use, supervised by the dentist Aplicación en casa, supervisado por el dentista

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

KIT: 3 x 3g syringes of CLARIDEX 10%, 16% or 22% + accessories.
Reposition: 1 x 3g syringe of CLARIDEX 10%, 16% or 22% + accessories.
KIT: 3 x jeringas con 3g de CLARIDEX 10%, 16% o 22%; + accesorios.
Reposición: 1 x 3g jeringa de CLARIDEX 10%, 16% o 22% + accesorios.



• INFORMATION
• INFORMACIONES



CLARIDEX DAY 6% - 7,5%

Bleaching Agent -Hydrogen Peroxide
Agente Blanqueador - Peróxido de Hidrógeno

- Neutral pH;
- Yields 7 to 10 applications.
- pH neutro;
- Proporciona desde 7 hasta 10 aplicaciones.

			
Bleaching agent for vital teeth. Hydrogen peroxide Blanqueamiento para dientes vitales. Peróxido de hidrógeno	Two different concentrations: 6% and 7,5% Dos concentraciones distintas: 6% y 7,5%	Home use, supervised by the dentist Aplicación en casa, supervisado por el dentista	
			
Fast action Acción rápida	Neutral pH pH neutro	High viscosity Alta viscosidad	Indication of use: 1 hour per day Indicación de uso: 1 hora al día



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

KIT: 3 x 3g syringes of CLARIDEX DAY 6% or 7,5% + accessories.
REPOSITION: 1 x 3g syringes of CLARIDEX DAY 6% or 7,5% + accessories.
KIT: 3 x 3g jeringas de CLARIDEX DAY 6% o 7,5% + accesorios.
Reposición: 1 x 3g jeringa de CLARIDEX DAY 6% o 7,5% + accesorios.

• INFORMATION
• INFORMACIONES





BIOPLIC

Light-Cured Temporary Restorative Material

Material Restaurador Provisional Fotocurable

- Multiple uses in endodontics, prosthesis and implants;
- Time saving.
- Múltiplas aplicaciones, en endodoncia, prostodoncia, implantes;
- Ahorro de tiempo.

• INFORMATION
• INFORMACIONES



		
Translucent: does not interfere with aesthetics Translúcido: no interfiere estéticamente	Great marginal sealing Óptimo sellado marginal	Easy to apply Fácil aplicación
		
Also for confection of occlusal matrix También para la confección de la matriz oclusal	Without eugenol Sin eugenol	Doesn't need etching No necesita ácido antes del uso
		
Preventive action due to the presence of fluoride Acción preventiva por la presencia del flúor	Enough for approximately 50 applications Rinde aprox. 50 aplicaciones	Easy to remove without burs and in a single piece Fácil remoción: sin fresa y en una sola pieza



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
2 x syringes with 2g of BIOPLIC.
2 x jeringas con 2g de BIOPLIC.

FILLTEMP

Obturator/Temporary Restorative

Obturator/Restaurador Provisional

- Paste for obturation/ temporary filling in dental procedures;
- Practical: ready to use;
- Adequate for cavity sealing;
- Setting time is between 10 and 20 minutes.
- Pasta para obturación/restauración provisional;
- Práctico: listo para uso;
- Adecuado sellado de cavidad;
- Tiempo de fraguado entre 10 y 20 minutos.

			
Fast and easy to apply Fácil y rápida aplicación	Without Eugenol Sin Eugenol	Resistant to chewing forces Resistente a las fuerzas de la masticación	Adequate cavity sealing Adecuado para el sellado de la cavidad



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
1 x flask with 25g of FILLTEMP.
1 x frasco con 25g de FILLTEMP.

GHF

Dentin Desensitizer

Desensibilizante Dentinario

- The most powerful desensitizer of the market;
- Combines 3 desensitizing agents;
- Glutaraldehyde - Hema - Fluorine.
- El desensibilizante más eficaz del mercado;
- Combinación de tres agentes desensibilizantes:
- Glutaraldehído - Hema - Fluoruro.

			
Powerful Potente	Doesn't form a layer No forma capa	Fast and long lasting action (up to 6 months) Acción rápida y prolongada (hasta 6 meses)	Doesn't need to be light cured No necesita ser fotocurado



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
1 x flask with 3ml of GHF.
1 x frasco con 3ml de GHF.



MASTER FILL

Light-Cured Universal Composite

Resina Compuesta Fotocurable

INFORMATION
INFORMACIONES


PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

KIT: 6 x Syringes with 4g of MASTER FILL
+ 1 x syringe with 3g of ATTAQUE GEL
+ 1 x flask 5ml of MASTER BOND DE
+ accessories.

Shades: A2 - A3 - A3.5 - B1 - C2 - 0A2.

KIT: 6 x jeringa con 4g de MASTER FILL
+ 1 x jeringa con 3g de ATTAQUE GEL
+ 1 x frasco con 5ml de MASTER BOND DE
+ accesorios.

Colores: A2 - A3 - A3.5 - B1 - C2 - 0A2.

Reposition: 1 x syringe with 4g of MASTER FILL

Shades: A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 - B0.5 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - C4 - D3 - INCISAL - 0A2 - 0A3 - 0B2.

Reposición: 1 x jeringa con 4g de MASTER FILL

Colores: A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 - B0.5 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - C4 - D3 - INCISAL - 0A2 - 0A3 - 0B2.

- Indicated for restorations in posterior and anterior teeth;
- Easy to handle;
- With natural fluorescence;
- Microhybrid and Radiopaque;
- Loyal to VITA color scale.
- Adecuado para la restauración de dientes posteriores y anteriores;
- Fácil manipulación;
- Con fluorescencia natural;
- Microhíbrida y radiopaco;
- Fidelidad de color a la escala VITA.



For dentin and
enamel
Para la dentina y el
esmalte



18 shades
18 colores



Excellent finishing and
polishing
Excelente acabado y
pulido



Great mechanical
properties
Excelentes propiedades
mecánicas



Color stability after
light cured
Estabilidad del color
después de fotocurado



Ideal viscosity for
insertion and sculpture
Viscosidad ideal para la
inserción y esculpir

MASTER FLOW

Light-cured Low Viscosity Flowable Composite

Resina Fluida de Baja Viscosidad Fotocurable

INFORMATION
INFORMACIONES


- Indicated for aesthetic dental restorations, sealing of deep pits and fissures, bonding of dental fragments;
- Excellent cost x benefit relation;
- Color variety;
- Liner under restorative composite resins and splinting teeth with mobility.
- Indicado para restauraciones dentáreas estéticas, sellado de fosas y fisuras;
- Excelente relación costo-beneficio;
- Variedad de colores;
- Liner bajo resinas compuestas restauradoras y esplintajes de dientes con movilidad.



Shade stability and
durability
Estabilidad de color y
durabilidad



Easy to handle
Fácil de manejar



High shine
Alto brillo



with glass-ceramic
microparticles
modified organically
Con micropartículas
vitrocerámicas modificadas
orgánicamente



High mechanical
resistance
Excelente resistencia
mecánica



High fluidity
Alta fluidez



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

KIT: 3 x syringes with 2g of MASTER FLOW
+ accessories.

Shades: A2 - A3.5 - 0A2.

KIT: 3 x jeringas con MASTER FLOW
+ accesorios.

Colores: A2 - A3.5 - 0A2.

Reposition: 1 x syringe of 2g of MASTER FLOW
+ acessórios.

Shades: A1 - A2 - A3 - A3.5 - B1 - B2 - B3 - C3 - C4 - 0A2.

Reposición: 1 x jeringa con 2g de MASTER FLOW
+ accesorios.

Colores: A1 - A2 - A3 - A3.5 - B1 - B2 - B3 - C3 - C4 - 0A2.



MASTER BOND DE

Light-Cured Single Component Adhesive

Adhesivo Monocomponente Fotocurable

- Indicated for dentin and enamel;
- Ethanol based;
- Single component (1 flask).
- Indicado para la dentina y el esmalte;
- Basado de Etanol;
- Monocomponente (frasco único).



Up to 155 drops
Rinde hasta 155 gotas



5th generation bond
Adhesivo de 5ª generación



High bonding resistance
Alta resistencia adhesiva



Nanotechnology
Nanotecnología



Adheres to multiple substrates
Se adhiere a múltiples sustratos



Ethanol based
Basado de Etanol



•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

KIT: 2 x flasks with 5ml of MASTER BOND DE
+ 1 x flask with 5ml of ATTAQUE GEL
+ accessories.

Reposition: 1 flask with 4ml or 5ml of MASTER BOND DE.

KIT: 2 x frasco con 5ml de MASTER BOND DE
+ 1 x frasco con 5ml de ATTAQUE GEL
+ accesorios.

Reposición: 1 x frasco con 4ml o 5ml de MASTER BOND DE.

BIOCAL

Light-Cured Calcium Hydroxide Paste

Hidróxido de Calcio Fotocurable

- Used for pulp capping, lining and opacification under restorative materials, cements or other materials;
- Compatible with restorative materials.
- Para el recubrimiento pulpar, revestimiento protector bajo materiales restauradores, cementos y otros materiales de base;
- Compatible con otros materiales restauradores.



Radiopaque
Radiopaco



Colors: Dentin and white
Colores: dentina y blanco



Ready to use
Listo para uso



Water Insoluble
Insoluble en agua



Biocompatible
Biocompatible



More aesthetic
Más estético




Practical & economical
Práctico y económico



Saves time
Ahorro de tiempo



Resistant to phosphoric acid
Resistente al ácido ortofosfórico

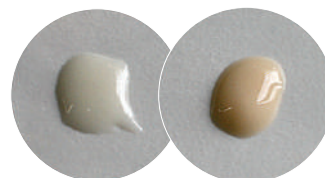

white/blanco

dentin/dentina



•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

BIOCAL Dentin: 1 x syringe with 2g of BIOCAL Dentin
+ accessories.

BIOCAL White: 1 x syringe with 2g of BIOCAL White
+ accessories.

BIOCAL Dentina: 1 x jeringa con 2g de BIOCAL Dentina
+ accesorios.

BIOCAL Blanco: 1 x jeringa con 2g de BIOCAL Blanco
+ accesorios.



EVICÁRIE

Dentin Caries Indicator

Indicador de Dentina con Caries

- Helps to identify the contaminated and infected dentin.
- Ayuda en la diferenciación de las dentinas contaminadas e infectadas.



Easy application
Fácil aplicación



Does not pigment other tissues
No pigmenta los demás tejidos



Does not stain the restorations
No mancha las restauraciones



Red dye, present in its formulation, only shows the demineralized and infected dentin
El colorante rojo, presente en su formulación, evidencia sólo la dentina desmineralizada e infectada



Allows preservation of healthy and remineralizable dental structure
Permite la preservación de la estructura dental sana y remineralizable



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 10ml flask of EVICARIE.
1 x 10ml frasco de EVICARIE.

• INFORMATION
• INFORMACIONES



CALCIUM HYDROXIDE P.A. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.

Pulp Capping

Recubrimiento Pulpar



- Excellent in the induction of sclerosing and repairing dentin formation;
- Highly alkaline;
- high degree of purity.
- Excelente para estimular la formación de la dentina reparadora;
- Altamente alcalino;
- Alto grado de pureza.



Alkaline pH
pH alcalino



Biocompatible
Biocompatible



High degree of purity, selected raw materials
Alto grado de pureza, materias primas seleccionadas



Induces the formation of restorative dentin
Estimula la formación de la dentina reparadora

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x flask with 10g of CALCIUM HYDROXIDE P.A.
1 x frasco con 10g de HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.

• INFORMATION
• INFORMACIONES



ATTAQUE GEL

Phosphoric Acid 37%

Ácido Ortofosfórico 37%

- Indicated for enamel and dentin conditioning;
- Good thixotropy;
- Blue color;
- Easy to remove with water.
- Indicado para acondicionamiento del esmalte y de la dentina;
- Ótima tixotropía;
- Color azul;
- Fácil eliminación con agua.



The blue color allows an excellent contrast, facilitates the visualization during the application and removal
El color azul permite un excelente contraste, facilita la visualización durante la aplicación y remoción



Doesn't leave residues after washed
No deja residuos después del lavado



Ideal viscosity for selective application
Viscosidad ideal para aplicación selectiva



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

3 x syringes with 3g of ATTAQUE GEL.
Bulk 40 x packages with 3 x syringes of 3g ATTAQUE GEL + accessories.
3 x jeringas con 3g de ATTAQUE GEL.
Bulk 40 x embalajes con 3 x jeringas de 3g de ATTAQUE GEL + accesorios.

• INFORMATION
• INFORMACIONES





BIOFORTY

Light-Cured Surface Sealant for Restorations

Sellante de Superficie para Restauraciones Fotocurable

- Indicated to seal surface of new and pre-existing restorations;
- Increases restoration longevity; Prevents infiltration;
- Its viscosity allows flow at the tooth / restoration interface.
- Adecuado para sellamiento de superficies de restauraciones nuevas y preexistentes;
- Aumenta la longevidad de la restauración: evita las infiltraciones;
- Su viscosidad permite el flujo en la interfaz diente / restauración.

		
Colorless Transparente	Low viscosity Baja viscosidad	Has charge Posee carga
		
It should be reapplied every 6 months Se debe volver a aplicar cada 6 meses	Improves the restoration resistance Mejora la resistencia de la restauración	Prevents staining Previene la tinción
		
Can be used in composite, ionomer or amalgam restorations Puede ser utilizado en restauraciones de resina, iónomero o amalgama	Used in new and pre- existing restorations Utilizado en restauraciones nuevas y preexistentes	Light curing Fotocurable



•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x flask with 5ml of BIOFORTY.

1 x frasco con 5ml de BIOFORTY.

ZINC OXIDE OXIDO DE ZINC

Temporary Restorative Material

Material Restaurador Provisional

			
High quality Alta calidad	Minimal contraction Contracción minima	Insulating effect Efecto aislante	Great Marginal Sealing Gran sellado marginal

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x flask with 50g of ZINC OXIDE.

1 x frasco con 50g de OXIDO DE ZINC.



•INFORMATION
•INFORMACIONES





EUGENOL

Temporary Restorative Material
Material Restaurador Provisional



High quality
Alta calidad



Analgesic and
antiseptic properties;
Propiedad analgésica
y antiséptica



Biocompatible
Biocompatible



High purity
Alta pureza



Anodyne action
Acción anodina



Healing action
Acción curativa



•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
1 x flask with 20ml of EUGENOL.
1 x frasco con 20ml de EUGENOL.

INTERIM KIT

Temporary Restorative Material
Material Restaurador Provisional



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
1 x flask with 15ml of INTERIM liquid
+ 1 x flask with 38g of INTERIM powder
+ accessories.
1 x frasco con 15ml de INTERIM líquido
+ 1 x frasco con 38g de INTERIM polvo
+ accesorios.

- Modified ZOE;
- Ivory Color.
- Óxido de Zinc y Eugenol modificado;
- Color marfil.



Antiseptic and
sedative
Antiséptico y sedante



Reduced setting time
(5 - 8 min)
Tiempo de fraguado
reducido (5-8 min)



Easy manipulation and
insertion in the cavity
Fácil manipulación e
inserción en la cavidad



Insoluble in oral
environment
Insoluble en el
medio oral



Great marginal sealing
Gran sellado marginal



Resistant to compression
and abrasion
Resistente a la
compresión y a la
abrasión

•INFORMATION
•INFORMACIONES



VARNAL

Cavity Varnish
Barniz de Cavidad



- Indicated for amalgam restorations;
- Reduces marginal infiltration.
- Indicado para restauraciones en amalgama;
- Reduce la infiltración marginal.



Raw material with
high degree of
purity
Materia prima de
alta pureza



Barrier against
chemical agents
Barrera contra
agentes químicos



Forms a layer on the
surface
Forma una capa
sobre la superficie



Promotes
marginal sealing
Promueve
el sellado
marginal

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
1 x flask with 10ml of VARNAL.
1 x frasco con 10ml de VARNAL.

•INFORMATION
•INFORMACIONES





GLASS IONOMERS IONÓMERO DE VIDRIO

IONOFAST

Light Curing Glass Ionomer Cement Ready to be Used
Cemento de Ionómero de Vidrio Fotocurable Listo para Uso

- Indicated for base and lining of cavity preparations for all types of restorative materials;
- Pit and fissure sealing;
- Restoration of small cavities;
- Filling small retentions and defects in preparations.
- Indicado para base y revestimiento de cavidades para todos los tipos de materiales de restauración;
- Sellado de fosas y fisuras;
- Restauración de pequeñas cavidades;
- Relleno de pequeñas retenciones o defectos en las preparaciones.

		
Simple, fast and without waste Sencillo, rápido y sin desperdicio	Single component: time saving Monocomponente: ahorro de tiempo	Light cured in seconds Fotocurable en segundos
		
High resistance to compression; + 200Mpa Alta resistencia a la compresión: + 200Mpa	Prophylactic action: Presence of fluoride Acción profiláctica: presencia de fluoruro en la composición	Biocompatible Biocompatible
		
Ideal viscosity, allows flow and adaptation in the cavity Viscosidad ideal: permite un flujo adecuado y adaptación en la cavidad	Radiopaque Radiopaco	Ready to use Listo para uso



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
1 x syringe with 2.5g or 5g of IONOFAST
+ accessories.
Shade: A3.
1 x jeringa con 2.5g o 5g de IONOFAST
+ accesorios.
Color: A3.

INSTRUCTIONS FOR USE: INSTRUCCIONES DE USO

	1 Preparation of the cavity according with the restoration technique chosen. Preparación de la cavidad de acuerdo con la técnica de restauración elegida.		4 Apply IONOFAST into the cavity directly from the syringe (avoid cross-contamination, decontaminating the tip of the syringe after use). In cases of need of a thicker layer (> 1 mm), apply and light cure by layers. Aplique IONOFAST en la cavidad directamente desde la jeringa (evite la contaminación cruzada, descontaminando la punta de la jeringa después de su uso). En casos de necesidad de una capa más gruesa (> 1 mm), aplicar y curar por capas.
	2 Wash and dry the surface. Lavar y secar la superficie.		5 Light cure at a distance of 2mm during 20 seconds. Fotocurar a una distancia de 2mm por 20 segundos.
	3 Apply a liner in deeper cavity areas (calcium hydroxide cement for example). Aplique un revestimiento en zonas más profundas de la cavidad (por ejemplo, cemento de hidróxido de calcio).		6 Restore cavity according to selected technique and manufacturer's instructions for selected material. Restaurar la cavidad de acuerdo con la técnica seleccionada y las instrucciones del fabricante para el material seleccionado.

For sealing of pits and shallow fissures apply phosphoric acid prior to application of IONOFAST.
Para sellado de fosas y fisuras rasas acondicionar con ácido fosfórico previamente la aplicación de IONOFAST.



BIOGLASS

Glass Ionomer Cement
Cemento de Ionómero de Vidrio

BIOGLASS C

- Cementation.
- Cementación.

BIOGLASS F

- Cavity lining;
- Filling of small retentions or defects in preparation, recovery of cusp stiffness without dentin support.
- Revestimiento de cavidad;
- Llenar pequeñas retenciones o defectos, la recuperación de la rigidez de las cúspides sin el apoyo de la dentina.

BIOGLASS R

- Restoration;
- Restorations in the deciduous dentition and restorations of erosion, abrasion and root caries;
- Especially indicated for ART technique (atraumatic restorative treatment) in pediatric dentistry, special patients and geriatrics.
- Restauración;
- Restauraciones en dientes deciduos y restauraciones de erosión, abrasión y de caries de raíz;
- Especialmente indicado para la técnica ART (tratamiento restaurativo atraumático) en odontología pediátrica, los pacientes especiales y la geriatría.

		
Chemical cure mechanism Mecanismo de curado químico	Fluoride release Liberación de fluoruro	High mechanical resistance Alta resistencia mecánica
		
Radiopaque Radiopaco	Low solubility Baja solubilidad	Biocompatible Biocompatible

+INFORMATION +INFORMACIONES

BIOGLASS C



BIOGLASS F



BIOGLASS R



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Bioglass C: 1 x flask with 15g of BIOGLASS C powder + 1 x flask with 10ml of BIOGLASS C liquid + accessories.

Bioglass F: 1 x flask with 10g of BIOGLASS F powder + 1 x flask with 13ml of BIOGLASS F liquid + accessories.

Bioglass R: 1 x flask with 10g of BIOGLASS R powder + 1 x flask with 8ml of BIOGLASS R liquid + accessories.

Bioglass C: 1 x frasco con 15g de BIOGLASS C polvo + 1 x frasco con 10ml de BIOGLASS C líquido + accesorios.

Bioglass F: 1 x frasco con 10g de BIOGLASS F polvo + 1 x frasco con 13ml de BIOGLASS F líquido + accesorios.

Bioglass R: 1 x frasco con 10g de BIOGLASS R polvo + 1 x frasco con 8ml de BIOGLASS R líquido + accesorios.

RESIGLASS

Light Curing Glass Ionomer Cement.
Cemento de Ionómero de Vidrio Fotocurable

RESIGLASS F

- Cavity lining;
- Filling of small retentions or defects in preparation, recovery of cusp stiffness without dentin support;
- Reduce the risk of infiltration and postoperative sensitivity.
- Revestimiento de cavidad;
- Llenar pequeñas retenciones o defectos, la recuperación de la rigidez de las cúspides sin el apoyo de la dentina;
- Reducir el riesgo de infiltración y la sensibilidad postoperatoria.

RESIGLASS R

- Restauration;
- Allows treatment in a single session;
- Ideal for pediatric dentistry.
- Restauración;
- Permitir el tratamiento en una sola sesión;
- Ideal para la odontología pediátrica.

		
Light-cured Fotocurable	Fluoride release Liberación de fluoruro	Excellent adhesion to dentin Excelente adhesión a la dentina
		
Radiopaque Radiopaco	Biocompatible Biocompatible	

+INFORMATION +INFORMACIONES

RESIGLASS F



RESIGLASS R



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Resiglass F: 1 x flask with 10g of RESIGLASS F powder + 1 x flask with 8ml of RESIGLASS F liquid + accessories.

Resiglass R: 1 x flask with 10g of RESIGLASS R powder + 1 x flask with 8ml of RESIGLASS R liquid + accessories.

Resiglass F: 1 x frasco con 10g de RESIGLASS F polvo + 1 x frasco con 8ml de RESIGLASS F líquido + accesorios.

Resiglass R: 1 x frasco con 10g de RESIGLASS R polvo + 1 x frasco con 8ml de RESIGLASS R líquido + accesorios.



INDIRECT RESTORATION RESTAURACIÓN INDIRECTA

PROVIPLAST

Bisacrylic Resin

Resina Bisacrilica

- Indicated for temporary Crowns, Bridges, Inlays and Onlays.
- Indicado para Coronas, Puentes, Inlays y Onlays Provisionales.

•INFORMATION
•INFORMACIONES



 Aesthetic temporary pieces in less than 5 minutes Provisionales estéticos en menos de 5 minutos	 Low heating during polymerization Bajo calentamiento de polimerización	 With a cartridge approximately 80 pieces can be made El rendimiento de un cartucho es de aproximadamente 80 piezas
 Esthetics restoration, very close to the natural teeth Restauración estética, similar al diente natural	 High quality finishing Acabado de alta calidad	 Time saving Ahorro de tiempo
 No waste Sin desperdicio	 Resistance and durability Resistencia y durabilidad	 Tasteless and Odorless Sin sabor y sin olor
 Allows reline Permite rebasado	 Fluorescence Fluorescencia	 Biocompatible Biocompatible
 Self mixables Automezclable	 Practicality Practicidad	 Less working time Menor tiempo de atención



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:




1 X 70g cartridge of PROVIPLAST proportion 1:1.

Shades: A1, A2, A3 and B1.

1 X 70g cartucho de PROVIPLAST proporción 1:1.

Colores: A1, A2, A3 y B1.

INSTRUCTIONS FOR USE: INSTRUCCIONES DE USO

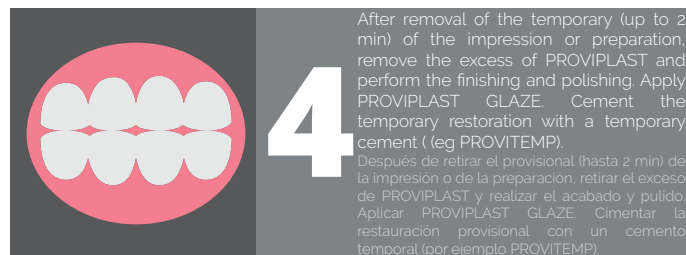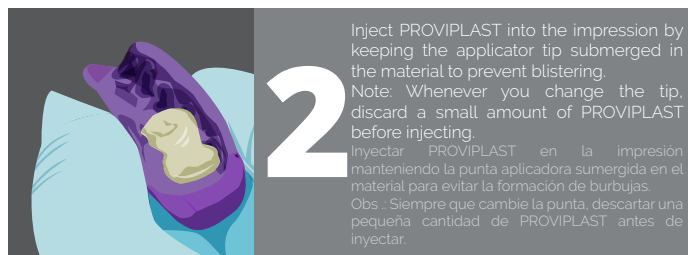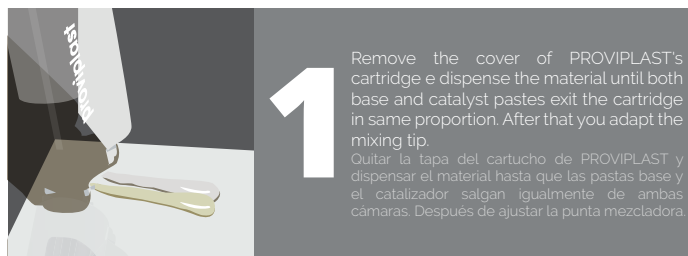



PROVITEMP

Temporary Cement for Veneers, Crowns Bridges, Inlays and Onlays

Cemento temporal para carillas, coronas, puentes, Inlays y Onlays

•INFORMATION
•INFORMACIONES



Ease of use Facilidad de uso	Without Eugenol Sin Eugenol	Good adhesion Buena adherencia
The unique colorless: does not interfere with the color of the provisional Único incoloro: no interfiere en el color de los provisionales	Resists masticatory impacts Resiste a los impactos masticadores	Does not suffer erosion by oral fluids No sufre erosión por fluidos orales
Resistant: prevents infiltration and retains provisional restoration Resistente: evita infiltración y retiene la restauración provisional	Ease of removal, cleaning of preparation and prosthetic parts Facilidad de remoción, limpieza de la preparación y de las piezas protéticas	Fast setting 1 - 2 min Cura rápida 1 - 2 minutos



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 2,5g syringe of PROVITEMP Base
+ 1 x 2,5g syringe of PROVITEMP Catalyst + accessories.
1 x 2,5g jeringa de PROVITEMP Base
+ 1 x 2,5g jeringa de PROVITEMP Catalizador: + accesorios.

•INFORMATION
•INFORMACIONES



ATTAQUE F

Porcelain conditioner Hydrofluoric acid 10%

Acondicionador de Porcelana Ácido fluorhídrico 10%

- Used to etch prosthetics pieces.
- Utilizado para el acondicionamiento de piezas protéticas.

Easy to remove using water Fácil remoción con agua	Thixotropic Tixotrópico	Control of the application due to its consistency Control de la aplicación debido a su consistencia

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 2,5g syringe of ATTAQUE F
+ accessories.
1 x 2,5g jeringa de ATTAQUE F
+ accesorios.



•INFORMATION
•INFORMACIONES



SILANO

Silane Solution

Acondicionador de Porcelana

- Promotes the bond in the processes of adhesive cementation.
- Promueve la unión en los procesos de cementación adhesiva.

Enhances adhesion up to 30% Potencializa la adhesión en hasta un 30%	Chemical bonding agent Agente de unión química	Promotes stable chemical bonding Promueve un enlace químico estable
Color stability after setting Estabilidad de color después de curado	Allows better adhesion Proporciona mayor adhesividad	



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 5ml flask of SILANO.
1 X 5ml frasco de SILANO.



INDIRECT RESTORATION RESTAURACIÓN INDIRECTA

MASTER CEMENT DUAL

Dual Cured Resin Cement

Cemento Resinoso Dual

• Indicated for adhesive cementation of ceramic indirect restorations, composites, ceromers, inlays, onlays and veneers, crowns and bridges, with or without metal, fused or prefabricated endodontic cores and adhesive prosthesis.

• Indicado para la cementación adhesiva de restauraciones indirectas de cerámica, composites o cerómeros, inlays, onlays, carillas, coronas y puentes con o sin metal, núcleos de endodoncia prefabricados o fundidos y prótesis adhesivas.

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 X 5g syringe of MASTER CEMENT DUAL + 05 x mixing tips
+ 01 x economical tip.

Shades: Translucent, A1, A2 and A3.

1 X 5g jeringa de MASTER CEMENT DUAL + 05 x puntas de mezcla
+ 01 x punta económica.

Colores: Translúcido, A1, A2 y A3.

•INFORMATION


•INFORMACIONES



 High adhesive and flexural strength Alta resistencia adhesiva y flexural	 Easy to handle and apply Fácil de manejar y aplicar	 Variety of colors Variedad de colores
 Dual-body syringe: suitable proportioning and handling Jeringa de doble cuerpo: Proporción y manipulación adecuadas	 Two dispensing tips options: mixing and economical Dos opciones de punta dispensadora: mezcladora y económica	 Difference: exclusive economic tip from Biodinamica Diferencia: punta económica exclusiva de Biodinamica
 Great value for money Excelente relación calidad x precio	 Can be cured chemically or by light cure Puede ser curado químicamente o fotopolimerizador	



INSTRUCTIONS FOR USE: INSTRUCCIONES DE USO

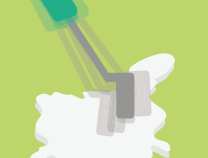	1 Place in the mixing pad equal amounts of base and catalyst. Coloque en el bloque de mezcla cantidades iguales de base y catalizador.		4 Apply a uniform layer of that mixture on the interior of the prosthetic piece or on the oral cavity, covering the entire surface. Aplicar una capa uniforme de esa mezcla en el interior de la pieza provisional o sobre la cavidad dental, cubriendo toda la superficie.
	2 Dry the prepared tooth and the internal part of the prosthetic piece. Secar el diente preparado y la parte interna de la pieza protésica.		5 Firmly adapt the piece on the tooth. Adapta firmemente la pieza sobre el diente.
	3 Mix the base and catalyst for approximately 10 seconds until obtain a homogeneous product. Mezcle la base y el catalizador durante aproximadamente 10 segundos hasta obtener un producto homogéneo.		6 Remove the excess of cement after the fixation. Retire el exceso de cemento después de la fijación.



MASTER CEMENT TRY IN

Try In Material for Cementation

Material de Prueba para la Cementación

- For a perfect chromatic simulation of resin cements, control and adjustments of the final indirect restorations.
- Indicado para la simulación de colores de los cementos resinosos. Controle y ajuste de la adaptación final de las restauraciones indirectas.



Colors based on classic Vita scale
Colores basados en la escala Vita clásica



Color simulation of Cement Master Cement Dual or LC
Simulación de los colores del cemento Master Cement Dual o LC



Easily removed with water (glycerin base)
Fácilmente removido con agua (base en glicerina)



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 2,5g syringe of MASTER CEMENT TRY IN + accessories.

Shades: Translucent, A1, A2 and A3.

1 x 2,5g jeringa de MASTER CEMENT TRY IN + accesorios.

Colores: Translúcido, A1, A2 y A3.

•INFORMATION
•INFORMACIONES



MASTER CEMENT LC

Light-cured Resin Cement.

Cemento Resinoso Fotocurable

- Indicated for adhesive cementation of ceramic indirect restorations, composites, ceromers, inlays, onlays and veneers.
- Indicado para cementaciones adhesivas de restauraciones indirectas, composites o cerómeros, inlays, onlays y carillas.



Good viscosity
Buena viscosidad



Color stability after light-cured
Estabilidad de color después de la fotocurado



High mechanical and adhesive strength in ceramic pieces after cementation
Elevada resistencia mecánica y adhesiva en piezas cerámicas después de la cementación



Great value for money
Excelente relación calidad x precio



Compatible with all kinds of adhesive systems
Compatible con todos los tipos de sistemas adhesivos



Small film thickness
Pequeño espesor de película



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 X 2,5g syringe of MASTER CEMENT LC + accessories.

Shades: Translucent, A1, A2 and A3.

1 X 2,5g jeringa de MASTER CEMENT LC + accesorios.

Colores: Translúcido, A1, A2 y A3.

•INFORMATION
•INFORMACIONES





GINGIVAL RETRACTION RETRACCIÓN GINGIVAL

RETRACTIVE

Hemostatic for Topical Use

Hemostático para Uso Tópico

- Contains ferric sulphate.
- Contiene sulfato férrico.



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 2,5g syringe of RETRACTIVE
+ accessories.

1 x 2,5g jeringa de RETRACTIVE + accesorios.



Does not interfere with
the setting of molding
materials
No interfiere en el fraguado de
los materiales de moldeo



Epinephrine free
- may be used in cardiac
patients
Libre de epinefrina
- puede ser utilizado en
pacientes cardiacos



Gel



Safe and effective
Seguro y eficaz

•INFORMATION
•INFORMACIONES



HEMOSTANK

Hemostatic for Topical Use

Hemostático para Uso Tópico

- Epinephrine free;
- Fast action on gingival fluids control and bleeding;
- Easy to application;
- Contains aluminum chloride, which is considered one of the safest substances.
- Sin epinefrina;
- Actúa rápidamente en el control de los fluidos gingivales y desangramiento;
- Fácil aplicación;
- Contén cloruro de aluminio, que es considerado una de las sustancias más seguras del mercado.



Does not cause
gingival retraction
No causa retracción
gingival



Does not interfere at the
setting time of the molding
materials
No interfiere en el tiempo
de presa de los materiales



Does not stain
soft or hard
tissues
No mancha los
tejidos blandos o
duros



Safe and effective
Seguro y efectivo



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 10ml flask of HEMOSTANK.

1 x 10ml frasco de HEMOSTANK.

•INFORMATION
•INFORMACIONES



RETRAFLEX

Non Impregnated Retraction Cord

Hilo Retractor No Impregnado

- Best cost-benefit ratio among all the products in the market;
- Easy insertion at the gingival sulcus;
- Non impregnated;
- 100% cotton fibers.
- Mejor relación calidad-precio del mercado;
- Fácil de inserir en el surco gingival;
- No impregnado;
- 100% fibra de algodón.



06 thicknesses
06 espesores



Does not release fibers
Sin hilos sueltos



Various colors that aid in
the visualization of the
operative field
Diversos colores que
ayuda en la visualización
del campo operatorio



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 250cm flask of RETRAFLEX.

Thickness: 000 Ultra Extra thin | 00 Extra thin | 0 Thin | 1 Medium | 2 Thick | 3 Extra Thick.

1 x frasco con 250cm de hilo RETRAFLEX.

Espesores: 000 Ultra Extra Fino | 00 Extra Fino | 0 Fino | 1 Mediano | 2 Grueso | 3 Extra Grueso.

•INFORMATION
•INFORMACIONES





STERILIZATION REEL ROLLO DE ESTERILIZACIÓN

Disposable Packaging for Materials to be Subjected to Sterilization Processes

Embalaje Desechable para Acondicionamiento de Materiales a ser Sometidos a los Procesos de Esterilización

- Surgical grade paper and transparent laminated film, resistant and exempt of micro-holes;
- It guarantees the preservation of the sterility conditions of its contents;
- Provides adequate resistance to handling until the moment of use.
- Papel grado quirúrgico y película laminada flexible transparente, resistente y exenta de microfuros;
- Garantiza la preservación de las condiciones de esterilidad de sus contenidos;
- Ofrece una adecuada resistencia a la manipulación hasta el momento del uso.



Available in Sizes Disponibles en los tamaños
50mm
75mm
100mm
150mm
200mm
250mm
300mm

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Reel with 100m.

Rollo con 100m.

DISPOSABLE TRAYS CUBETAS DESECHABLES

 Ease of application of fluoride in gel form Facilidad de aplicación de flúor en forma de gel	 With foam of the inner layer - longer permanence of the fluoride gel inside the tray Con espuma en la capa interna - mayor permanencia del gel de flúor en el interior de la cubeta	 Economy of time Ahorro de tiempo
 Hecho en poliestireno: cubeta flexible Facilidad de aplicación de flúor en forma de gel	 Double, allows application in both arches simultaneously Doble, permite la aplicación en las dos arcadas simultáneamente	 More comfort for the patient Más comodidad para el paciente



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Box with 50 x units.

Bag with 100 x units.

Size: small, medium, large or mixed.

Caja con 50 x unidades.

Bolsa con 100 x unidades.

Tamaños: pequeño, mediano, grande o mezclado.



DISPOSABLE DESECHABLES

MASTER BRUSH

Disposable application brushes

Cepillos de aplicación desechables

- Three versions: regular (green), thin (yellow) and extra-thin (white).
- Tres versiones: regular (verde), fino (amarillo) y extra fino (blanco).



Three thicknesses
Tres espesores



Flexible rod
Vara flexible



Doesn't leave bristles
No pierde pelo



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Packages with 100 x units.

Thickness: Extra Thin, Thin and Regular.

Embalaje con 100 x unidades.

Espesores: Extra fino, Fino y Regular.

DISPOSABLE BIBS BABEROS DESECHABLES



- Patient protection guarantee: plastic layer prevents leakage;
- Great absorption capacity;
- Adequate size for protection.
- Garantía de protección al paciente: capa de plástico evita la fuga;
- Gran capacidad de absorción;
- Tamaño adecuado para protección.



Variety of colors
Variedad de colores



Excellent quality
Excelente calidad



Double layer
Capa doble



Non sterile
No Estéril



Resistant and
waterproof
Resistente y
impermeable



Practical and safe
Práctico y seguro

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Package with 100 x units.

Colors: White, Yellow, Blue, Pink, Green and Mixed.

Embalaje con 100 x unidades.

Colores: Blanco, Amarillo, Azul, Rosado, Verde e Mezclado.

DISPOSABLE BIBS SLIM BABEROS DESECHABLE SLIM



White color
Color blanco



Great value for money
Excelente relación
calidad x precio



Double layer
Capa doble



Quality and efficiency
in a smaller size
Calidad y eficiencia en
un tamaño menor



Resistant and waterproof
Resistente y impermeable



Practical and Safe
Práctico y seguro



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Package with 100 x units.

Color: white.

Embalaje con 100 x unidades.

Color: blanco.



ARTICULATING CARBON PAPER PAPEL CARBONO PARA ARTICULAR

- Used to detect occlusal interferences, mainly after restorations and prostheses.
- Utilizado para detectar interferencias oclusales, principalmente después de la realización de restauraciones y prótesis.



Good visualization of the interference area
Buena visualización del área de interferencia



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Package with 12 x leaves of Articulating Carbon Paper.
Embalaje con 12 x hojas de PAPEL CARBONO PARA ARTICULAR.

ABRASIVE POLYESTER STRIP TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER

- Indicated for interproximal finishing and polishing of restorations
- Indicada para el acabado y pulido interproximal en restauraciones



Effective finishing
Acabado eficiente



Flexible
Flexible



two abrasive surfaces
Dos superficies abrasivas



Neutral center facilitates insertion without removing the contact surface
Centro neutro facilita la inserción sin quitar la superficie de contacto



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Package with 100 or 150 x units.

Size: 4mm x 170mm.

Granulations: regular and thin.

Embalaje con 100 o 150 x unidades.

Tamaño: 4mm x 170mm.

Granulaciones: media y fina.

ABRASIVE STEEL STRIPS TIRAS ABRASIVAS DE ACERO

- Used for finishing and polishing interproximal surfaces of restorations, for all types of restorative materials, composites, acrylics, glass ionomer and amalgam.
- Utilizadas para el acabado y pulido de la superficie interproximal de las restauraciones, para todos los tipos de materiales restauradores, compuestos, acrílicos, ionómero de vidrio y amalgama.



Perfect granulation allows for longer durability and soft cut
Perfecta granulación permite mayor durabilidad y corte suave



Efficient finishing
Acabado eficiente



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

Package with 12 x units.

Sizes: 125mm x 4mm x 0,12mm.

125mm x 6mm x 0,12mm.

Embalaje con 12 x unidades;

Tamaños: 125mm x 4mm x 0,12mm.

125mm x 6mm x 0,12mm.



ALVEOLEX

Alveolar Dressing with Propolis

Curativo Alveolar con Propóleos

- The propolis present in the formulation, besides helping in the regeneration and the stimulation of the cicatrization, assists in the analgesia which provides a calmer postoperative period to the patient;
- The Iodoform incorporated into the product assists and complements the filling action of the alveolus by stimulating cell proliferation, besides possessing a slight antiseptic power;
- Its Eugenol-free formula does not cause irritation to contact with alveolar tissue.
- El propóleos presente en la formulación, además de auxiliar en la regeneración y en la estimulación de la cicatrización, auxilia en la analgesia lo que proporciona un postoperatorio más tranquilo al paciente;
- El yodoformio incorporado al producto auxilia y complementa la acción de llenado del alvéolo al estimular la proliferación celular, además de poseer un ligero poder antiséptico;
- Su fórmula exenta de Eugenol no provoca irritaciones al contacto con el tejido alveolar.



•INFORMATION
•INFORMACIONES



 Prevention and treatment of alveolitis Prevención e tratamiento de alveolitis	 Helps healing in diabetic patients Ayuda en la cicatrización de pacientes diabéticos	 Consistency provides prolonged permanence in the alveolus Consistencia proporciona la permanencia prolongada en el alvéolo
 Does not generate bacterial resistance No genera resistencia bacteriana	 Only one with propolis Único con propóleos	 Acitons: analgesic, anti-inflammatory and antimicrobial Acciones: analgésica, anti-inflamatoria y antimicrobiana
 Practical: paste ready-to-use Práctico: pasta lista para usar	 Acts as moldable alveolar cap Actúa como tampón alveolar moldeable	

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:


Syringe: 2 X 3g syringe of Alveolex + accessories.

Flask: 1 x 10g flask of Alveolex.

Jeringa: 2 x 3g jeringa de Alveolex + accesorios.


Frasco: 1 x 10g frasco de Alveolex.

INSTRUCTIONS FOR USE: INSTRUCCIONES DE USO

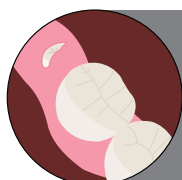


1

Initial situation.
Situación inicial.

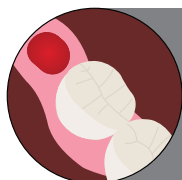


2

Alveolus after extraction.
Alvéolo después de la extracción.

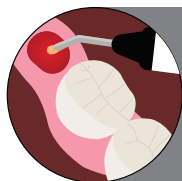


3

Insertion of Alveolex in the Alveolus.
Inserción de Alveolex en el alvéolo.

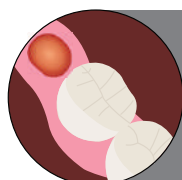


4

Verify if the entire alveolus is filled with Alveolex.
Verifique si todo el alvéolo está lleno de Alveolex.

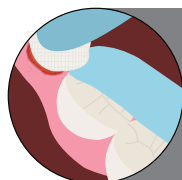


5

Dampen a sterile gauze in saline solution for better accommodation of Alveolex.
Umedecer una gasa estéril en suero fisiológico para mejor alojamiento de Alveolex.

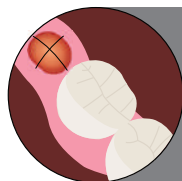

6

Suture normally after the filling of the Alveolus.
Suturar normalmente después del relleno del alvéolo.

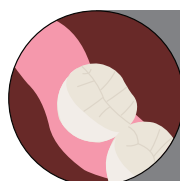

!!

ALVEOLEX besides helping in the healing of diabetic patients, also accelerates the osseous neoformation.
ALVEOLEX además de ayudar en la cicatrización de pacientes diabéticos, también acelera la neoformación ósea.



CARIESTOP

Cariostatic

- Indicated For prevention and inhibition of dental caries in cases of bottle caries, prevention of secondary caries, prevention of caries in pits and fissures.
- Indicado para la prevención e inhibición de la caries, en casos de caries de biberón, prevención de caries secundarias, prevención de caries en fosas y fisuras.

•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 5ml flask of CARIESTOP 30%.
1 x 10ml flask of CARIESTOP 12%.

1 x 5ml frasco de CARIESTOP 30%.
1 x 10ml frasco de CARIESTOP 12%.



With silver nitrate:
bactericidal action due
to the presence of silver
Con nitrato de plata: acción
bactericida debido a la
presencia de plata



Antimicrobial action - acts
more specifically on S. Mutans
Acción antimicrobiana - actúa
más específicamente sobre
S. Mutans



Preventive action
remineralizing by the
presence of fluoride
Acción preventiva
remineralizante por la
presencia de flúor



Cariostatic: prevents the
progression of caries by
dentin sclerosis/dentinaria
Cariostática: impide la progresión de
la caries, por la esclerosis dentinaria



Presentation in two
concentrations
Presentación en dos
concentraciones

BIOPHAT

Fluorescent Varnish

Barniz con Flúor

- Indicated for: prophylaxis and prevention of dental caries;
- Treatment of hypersensitive dentine cervix, especially after scaling procedures.
- Indicado para: profilaxis y prevención de la caries dental;
- Tratamiento de colos dentinarios hipersensibles, principalmente después de procedimientos de raspado.



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

2 x 3g syringes of BIOPHAT.
2 x 3g jeringas de BIOPHAT.

•INFORMATION
•INFORMACIONES



Source of fluoride: rapid
action (sodium fluoride)
Fuente de flúor: acción
rápida (fluoruro de sodio)



Great ease of
application
Gran facilidad de aplicación



Low solubility
Baja solubilidad



Highly adhesive to the
enamel surface
Altamente adhesivo a la
superficie del esmalte



Paste consistency
Consistencia de pasta



It does not flow
No escurre



Prevention and
prophylaxis against
teeth caries
Prevención y profilaxis
de la carie



It does not interfere at
the final result of the
dental bleaching
No interfiere en el
resultado final del
blanqueamiento dental



Remineralization of
the white stains
Remineralización de
las manchas blancas



It can be used on the
edges of the brackets,
restorations and crowns
Puede ser aplicado en los
bordes de los brackets,
restauraciones y coronas



Ideal for patients that
have difficulties in
toothbrushing
Ideal para pacientes con
dificultad de higienización



PREVENTION PREVENCIÓN

BIOSEAL SELF-CURED BIOSEAL AUTOPOLIMERIZABLE

Pit and Fissure Sealant

Sellador de Fosas y Fisuras

- Prevention against caries in pits and fissures.
- Para la prevención de la caries en fosas y fisuras.

		
Self-cured Autocurable	Has load Posee carga	Colorless Incoloro
		
Great fluidity in the pits and fissures Buenas fluidez en las fosas y fisuras	High adhesion Alta adhesión	Contains two sources of fluoride: Sodium Fluoride and Calcium Fluoride Contiene dos fuentes de fluor: Fluoruro de Sodio y Fluoruro de Calcio



• INFORMATION
• INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

KIT: 1 x 2,5ml flask of BIOSEAL SELF-CURED base
+ 1 x 2,5ml flask of BIOSEAL SELF-CURED catalyst
+ 1 x 5ml flask of ATTAQUEL GEL (orthophosphoric acid 37%)
+ accessories.

KIT: 1 x 2,5g frasco de BIOSEAL autopolimerizable base
+ 1 x 2,5g frasco de BIOSEAL autopolimerizable catalizador
+ 1 x 5ml frasco de ATTAQUEL GEL (ácido ortofosfórico al 37%).
+ accesorios.

BIOSEAL LIGHT-CURED BIOSEAL FOTOPOLIMERIZABLE

Pit and fissure sealant

Sellador de Fosas y Fisuras

- Prevention against caries in pits and fissures.
- Para la prevención de caries en fosas y fisuras.

		
Light-cured Fotocurable	Shade: Nuanced Color: Matizado	Great fluidity Buena fluidez
		
It acts as a mechanical and chemical agent through the release of fluoride in areas susceptible to caries Actúa como agente mecánico y químico a través de la liberación de fluor en áreas susceptibles a la caries	High adhesion rate Alto índice de adhesión	Contains two sources of fluoride: Sodium Fluoride and Calcium Fluoride Contiene dos fuentes de fluor: Fluoruro de Sodio y Fluoruro de Calcio



• INFORMATION
• INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

SYRINGE KIT:

2 x 2,5ml syringes of BIOSEAL LIGHT-CURED
+ 1 x 3g syringe of ATTAQUEL GEL (orthophosphoric acid 37%) + accessories.

FLASK KIT:

1 x 5ml flask of BIOSEAL LIGHT-CURED
+ 1 x 5ml flask of ATTAQUEL GEL (orthophosphoric acid 37%) + accessories.

REPOSITION: 1 x 2,5ml syringes of BIOSEAL LIGHT-CURED + accessories.

KIT JERINGA

2 x 2,5ml jeringas de BIOSEAL Fotopolimerizable
+ 1 x 3g jeringa de ATTAQUEL GEL (ácido ortofosfórico al 37%) + accesorios.

KIT FRASCO

1 x 5ml frasco de BIOSEAL fotopolimerizable
+ 1 x 5ml frasco de ATTAQUEL GEL (ácido ortofosfórico al 37%) + accesorios.

REPOSICIÓN: 1 x 2,5ml jeringas de BIOSEAL Fotopolimerizable + accesorios.

SODIUM BICARBONATE BICARBONATO DE SODIO

Bacterial plaque mechanical remover - dental biofilm

Removedor de la Placa Dental

- Indicated for dental prophylaxis.
- Removedor mecánico de placa bacteriana - biofilm dental.

	
Extra-thin controlled particle size, prevents clogging of peripherals Granulometría controlada extra-fina, evita obstrucción de periféricos	High degree of purity Alto grado de pureza



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 200g flask of SODIUM BICARBONATE.
1 x 500g flask of SODIUM BICARBONATE.
1 x 200g frasco de BICARBONATO DE SODIO.
1 x 500g frasco de BICARBONATO DE SODIO.



EVIPLAC

Disclosing Material

Revelador de la Placa Bacteriana



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

- 1 x flask with 10ml of EVIPLAC SOLUTION.
- 1 x flask with 60 un or 120 un of EVIPLAC TABLETS.
- 1 x box with 60 un of EVIPLAC BLISTER (10 blisters with 6 un each).
- 1 x box with 120 un of EVIPLAC BLISTER (20 blisters with 6 un each).
- 1 x frasco con 10ml de EVIPLAC SOLUCIÓN.
- 1 x frasco con 60 un o 120 un de EVIPLAC PASTILLAS.
- 1 x caja con 60 un de EVIPLAC BLISTER (10 blisters con 6un cada).
- 1 x caja con 120 un de EVIPLAC BLISTER (20 blisters con 6un cada).

INFORMATION INFORMACIONES

SOLUTION SOLUCIÓN



TABLETS PASTILLAS



- Indicated to stain the plaque/dental biofilm and make it visible.
- Indicado para colorear la placa bacteriana/biofilm dental y hacerla visible.



Facilitates visualization of dental biofilm
Facilita la visualización del biofilm dental



Bottle and tablets
Frasco y pastillas



Bottle yields approx. the application in 40 children
Frasco rinde, aprox. la aplicación en 40 niños



Ideal for hygiene instruction - enables patient orientation and visualization of actual oral hygiene conditions
Ideal para instrucción de higiene - posibilita la orientación del paciente y la visualización de las reales condiciones de

PUMICE POWDER PIEDRA PÓMEZ

Finishing and Polishing Material

Material para Acabado y Pulido

- Indicated for cleaning and polishing dental enamel, cohesive gold, amalgam and acrylic resin.
- Indicada para limpieza y pulido del esmalte dental, de oro cohesivo, amalgama y resina acrílica.



Excellent quality
Excelente calidad



Pure raw material
Materia prima pura



Perfect particle size
Granulometría perfecta



Para el acabado y pulido
For finishing and polishing



Pure
Puro



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

- 1 x 100g flask of PUMICE POWDER.
- 1 x 100g frasco de PIEDRA PÓMEZ.

FRUTTI-FLUOR GEL



Prevention and reduction of caries
Prevención y reducción de caries



Fast service - 1 minute of application
Rapidez en la atención - 1 minuto de aplicación



Bottle of 200ml
Botella de 200ml



Two versions: acidulated and neutral
Dos versiones: acidulado y neutro



Mineralizing and remineralizing action
Acción mineralizadora y remineralizante



Easy and practical application
Aplicación fácil y práctica



Neutral - no dyes, can be applied during or after tooth whitening
Neutral - sin colorantes, puede aplicarse durante o después del blanqueamiento dental



optimum thixotropy - under pressure, its viscosity decreases and the fluor penetrates the interproximal and hard to reach areas
óptima tixotropía - bajo presión, su viscosidad disminuye y el fluor penetra en las áreas interproximales y de difícil acceso



Ideal viscosity: Gel doesn't run from the trays
Viscosidad ideal, el gel no escurre de la cubeta



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

- 1 x 200ml flask of FRUTTI-FLUOR GEL neutral.
- 1 x 200ml flask of FRUTTI-FLUOR GEL tutti-frutti.
- 1 x 200ml flask of FRUTTI-FLUOR GEL strawberry.
- 1 x 200ml frasco de FRUTTI-FLUOR GEL neutro.
- 1 x 200ml frasco de FRUTTI-FLUOR GEL tutti-frutti.
- 1 x 200ml frasco de FRUTTI-FLUOR GEL fresa.



QUALITYGEL

Alginate
Alginato



- Excellent plasticity;
- Chromatic;
- High quality;
- Regular setting (3 to 4 minutes);
- Medium consistency: Type II.
- Excelente plasticidad;
- Cromático;
- Alta calidad;
- Fraguado normal (3 a 4 minutos);
- Consistencia mediana: Tipo II.

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 454g bag of QUALITYGEL or 1kg bucket of QUALITYGEL.

1 x 454g bolsa de QUALITYGEL o balde con 1kg de QUALITYGEL.

 high quality alta calidad	 Dust free Libre de polvo	 Great consistency Óptima consistencia
 Chromatic: changes shade after jellification Cromático: cambia el color después de la gelificación	 Tutti Frutti flavor Aroma de tutti-frutti	 Contains chlorhexidine Contiene clorhexidina
 High compatibility with plaster Alta compatibilidad con yeso		 Good flowability Buena escobabilidad



HYDROSEALER

Endodontic Cement

Cemento para Endodôncia

- Perfect obturation even in the most difficult cases;
- Stimulates the formation of repair tissue in the periapical region;
- Excellent retention and sealing ability;
- Excellent physical and biological properties.
- Perfecta obturación incluso en casos más difíciles;
- Estimula la formación de tejidos de reparación en la región periapical;
- Presenta excelente capacidad de retención y sellado;
- Excelentes propiedades físicas y biológicas.

NEW PRODUCT!

• INFORMATION
• INFORMACIONES



induction of
restorative dentin
inducción de
dentina reparadora



Provides intense
radiopacity
Proporciona intensa
radiopacidad



Biocompatible
Biocompatible




It has bactericidal
and bacteriostatic
action
Posee acción
bactericida y
bacteriostática



Promotes
obliteration of the
dental tubules
Promueve la
obliteración de los
tubulos dentinarios



Practicality
Practicidad

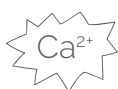

release of calcium
liberación de calcio



Dimensional
stability
Estabilidad
dimensional



Alkaline
Alcalino

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

KIT: 1 x 8g flask of HYDROSEALER powder
+ 1 x 9g flask of HYDROSEALER resin.

Reposition: 1 x 8g flask of HYDROSEALER
powder or 1 x 9g flask of HYDROSEALER resin.

KIT: 1 x 8g frasco de HYDROSEALER polvo
+ 1 x 9g frasco de HYDROSEALER resina.

Reposición: 1 x 8g frasco de HYDROSEALER polvo
o 1 x 9g frasco de HYDROSEALER resina.



HYDROPAST / HYDROPAST+I

Temporary Root Canal Filling Material / with Iodoform
Material Provisional para la Obturación del Canal Radicular / con Yodoformo

- For temporary obturation of the root canal: in the control of exudate, in periapical lesions, for induction of apicification; treatment of root resorption and / or perforation; as an aid in permanent filling in the apical plug technique and in pulpectomies in deciduous teeth;
- **HYDROPAST** Ready-to-use calcium hydroxide paste;
- **HYDROPAST+I** Ready-to-use calcium hydroxide paste with iodoform.
- Para la obturación temporal del canal radicular: en el control de exudado, en lesiones periapicales, para inducción de apicificación; tratamiento de reabsorción y / o perforación radicular; como auxiliar en la obturación permanente en la técnica de "plug" apical y en pulpectomías en dientes deciduos;
- Pasta de hidróxido de calcio lista para uso;
- Pasta de hidróxido de calcio con yodoformio lista para uso.

		
Long term curative curativo de demora	Ideal consistency to flow in the root canal Consistencia ideal para el flujo en el canal radicular	Temporary obturator: induces the apicification Obturador temporal: induce la apicificación
		
Antibacterial antibacteriano	Propiedad anti-infecciosa con efecto prolongado Prolonged anti-infective property	Biocompatible Biocompatible
		
Easy to use: ready for use Fácil aplicación: listo para uso		The iodoform provides a higher radiopacity to the material El yodoformio proporciona una mayor radiopacidad al material



•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 2.5g syringe of HYDROPAST.
1 x 2.5g syringe of HYDROPAST + I
+ accessories.
1 x 2.5g jeringa de HYDROPAST.
1 x 2.5g jeringa de HYDROPAST + I
+ accesorios.

CLOREXORAL

Canal Root Disinfection Material

Material para la Desinfección del Canal Radicular

- **In Dental Care:** for asepsis of cavity preparation before restorations and as an inhibitor of MMPs, if applied after conditioning with phosphoric acid, it paralyzes the degradation of the hybrid layers;
- **In endodontics:** for disinfection of root canals;
- **In surgery:** for asepsis of the operative field (face) and in mouthwash in the postoperative period;
- **In periodontics:** for disinfection after curettage of bags and root scraping;
- **In general practice:** for instrument disinfection.
- En la dentística: para asepsia de la preparación cavitaria antes de las restauraciones y como inhibidor de MMPs, se aplica después del condicionamiento con ácido fosfórico, paraliza la degradación de las capas híbridas;
- En la endodoncia: para desinfección de los canales radiculares;
- En cirugía: para asepsia del campo operatorio (cara) y en los mejillones en el periodo postoperatorio;
- En la periodoncia: para desinfección después de curetaje de bolsas y raspado radicular;
- En clínica general: para la desinfección de instrumentos.

		
Does not interfere with bonding agents No interfiere en la adhesión de los agentes de unión	Only one with 200ml (solution) Único con 200ml (solución)	Great value for money Excelente relación calidad x precio
		
Low toxicity: does not damage tissues Baja toxicidad: no lesiona los tejidos	Powerful anti-bacterial action Potente acción anti-bacteriana	Doesn't stain No mancha
		
Disinfection for root canals, asepsis of cavity preparations, surgical powders (mouthwashes) Desinfección para canales radiculares, asepsia de preparaciones cavitarias, post quirúrgico (enjuague bucal)		Residual effect: acts for up to 48 hours Tiene efecto residual: actúa hasta 48 horas

•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

CLOREXORAL Gel 2%: 1 x 3g syringe of CLOREXORAL GEL + accessories.
CLOREXORAL Solution: 1 x 100ml or 1 x 200ml of CLOREXORAL SOLUTION.
1 x 3g jeringa de **CLOREXORAL Gel** + accesorios.
1 x 100ml o 1 x 200ml frasco de **CLOREXORAL Solución**.



TRICRESOLFORMALINA

Root Canal Disinfection Material

Material para la Desinfección del Canal Radicular

- Indicated as delay dressing in cases of pulp necrosis.
- Indicado como curativo de demora en casos de necrosis pulpar.



Powerful anti-bacterial action
Potente acción anti-bacteriana



Flask with 10ml
Frasco con 10 ml



Antiseptic and disinfectant
Antiséptico y desinfectante



• INFORMATION
• INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
1 x 10ml flask of TRICRESOLFORMALINA.
1 x 10ml frasco de TRICRESOLFORMALINA.

PARAMONOCOLOROFENOL

Root canal disinfection material

Material para la Desinfección del Canal Radicular

INDICATION: INDICACIÓN

PARAMONOCOLOROFENOL

- Bacterial action of short term.

PARAMONOCOLOROFENOL WITH CAMPHOR

- Potentiates the anti-infective action.

PARAMONOCOLOROFENOL WITH FURACIN

- Potentiates the local anti-infective action.

PARAMONOCOLOROFENOL

- Acción bacteriana de corta duración.

PARAMONOCOLOROFENOL ALCANFORADO

- Potencializa la acción anti-infecciosa.

PARAMONOCOLOROFENOL CON FURACIN

- Potencializa la acción anti-infecciosa local.



Flask with 20ml
Frasco con 20ml



Double action due to the antiseptic properties of phenol and chlorine - released ion slowly, with antibacterial effect
doble acción debido a las propiedades antisépticas del fenol y del ion cloro - liberado lentamente, con efecto antibacteriano



• INFORMATION
• INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
1 x 20ml flask of PARAMONOCOLOROFENOL.
1 x 20ml flask of PARAMONOCOLOROFENOL WITH CAMPHOR.
1 x 20ml flask of PARAMONOCOLOROFENOL WITH FURACIN.
1 x 20ml frasco de PARAMONOCOLOROFENOL.
1 x 20ml frasco de PARAMONOCOLOROFENOL ALCANFORADO.
1 x 20ml frasco de PARAMONOCOLOROFENOL CON FURACIN.

ENDO PTC

Auxiliary Material in the Root Canal Instrumentation

Material Auxiliar en la Instrumentación de Canales Radiculares



Efficient cleaning guarantee
Garantía de limpieza eficiente



Increase in dentin permeability
Aumento en la permeabilidad dentinaria



Strong antiseptic action
Fuerte acción antiséptica



Decreases risk of instrument jam on the walls of the root canal, prevents fracture and accidents
Disminuye riesgo de obstáculo de los instrumentos en las paredes del canal, previene fractura y accidentes



Detergent capacity: totally soluble in water
Capacidad detergente: totalmente soluble en agua



Stable even at room temperature
Estable a temperatura ambiente

- Auxiliary in the chemical-mechanical preparation of the root canal, used alternately with the solutions of Sodium Hypochlorite.
- Auxiliar en la preparación químico-mecánica del canal radicular, utilizado alternativamente con las soluciones de Hipoclorito de Sodio.



2 x 3g jeringa de ENDO PTC.
1 x 25g frasco de ENDO PTC.

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:
Syringe: 2x 3g syringe of ENDO PTC.
Flask: 1 x 25g of ENDO PTC.

• INFORMATION
• INFORMACIONES





FORMOCRESOL

Material For the Mummification of the Dental Pulp

Material para la Momificación de la Pulpa Dental



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 10ml flask of FORMOCRESOL.

1 x 10ml frasco de FORMOCRESOL.

- To fix the live pulps, keeping them inert;
- To enable the conservation of the deciduous tooth until the physiological exfoliation (pulpotomy);
- Disinfect necrotic root canal.
- Para fijar las pulpas vivas, manteniéndolas inertes;
- Posibilitar la conservación del diente primario hasta la exfoliación fisiológica (pulpotomía);
- Desinfección de los canales necróticos.



Strong antiseptic
action
Fuerte acción antiséptica



Distance medication
Medicación a la distancia



Effective in delay
healing
Efectivo en la curación
de retardo



Root canal disinfection
Desinfección del canal
radicular

•INFORMATION
•INFORMACIONES



IODOFORM YODOFORMO

Component for Endodontic Paste

Componente para la Pasta Obturadora del Canal Radicular



Anti-infective
Anti-infeccioso



Provides intense
radiopacity
Proporciona intensa
radiopacidad

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 10g flask of IODOFORM.

1 x 10g frasco de YODOFORMO.



•INFORMATION
•INFORMACIONES



EDTA GEL

Chelating Agente

Agente Quelante

- Indicated to facilitate endodontic instrumentation; in the chemical treatment of the root in periodontal surgery; as a coadjuvant in scaling the root surface and decontamination of implants and to aid the cleaning of conduits that will receive the cementation of pins.
- Indicado para facilitar la instrumentación endodóntica; en el tratamiento químico de la raíz en cirugía periodontal; como coadyuvante en el raspado de la superficie radicular y descontaminación de implantes y para auxiliar la limpieza de conductos que recibirán la cementación de pines.



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

2 x 3g syringes of EDTA GEL + accessories.

2 x 3g jeringas de EDTA GEL + accesorios.



Ready-to-use
Listo para uso



Time and product
economy
Ahorro de tiempo
y producto



pH 8,5 and 9



Ease of
application
Facilidad de aplicación



With application tip
Con punta aplicadora



Water-soluble: leaves
no residue
Hidrosoluble: no deja
residuos



Fast and safe
action
Acción rápida y
segura



Viscosidad: desmenuada para escurrir
por toda a parede do canal radicular
Viscosidad: desarrollada
para fluir por toda la
pared del canal radicular

•INFORMATION
•INFORMACIONES





EDTA TRISSODIC EDTA TRISÓDICO

Chelating Agent

Agente Quelante

- Facilitates endodontic instrumentation, mainly of conduits - lubricant;
- It improves the quality of the cementation of nuclei, removes the smear layer from the inside of the prepared conduits;
- Facilitates the penetration of adhesive agents or cements into dentinal canaliculi.
- Facilita la instrumentación endodóntica, principalmente de los conductos - lubricante;
- Mejora la calidad de la cementación de núcleos, quita el "barrillo dentinario" del interior de los conductos preparados;
- Facilita la penetración de agentes adhesivos o cementos en el interior de los canales dentales.



Compatible with all
tissues
compatible con todos
los tejidos



Highly efficient
Altamente eficiente



Intense chelating
activity
Actividad quelante intensa



No tissue irritation
Irritación tisular nula



The EDTA liquid formula gives to
the product a higher dissolving
or dispersing power

La fórmula del EDTA
LÍQUIDO confiere al
producto un mayor poder
disolvente o dispersante



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x flask with 20ml of EDTA Trissodic Liquid.
1 x frasco con 20ml de EDTA Trissódico Líquido.

•INFORMATION
•INFORMACIONES



PULP FILL KIT

Endodontic Cement

Cemento para Endodoncia



Great Marginal
sealing
Grande sellado marginal



Bismuth and barium:
optimize radiopacity
Bismuto y bario: optimizan
la radiopacidad



Sticky - high adhesiveness
between cone and channel
Pegajoso - alta adhesividad
entre el cono y el canal



Composite presence:
Improves blending
characteristics and
delays setting time
Presencia de resina:
mejora las características
de mezcla y retarda el
tiempo de presa



Small powder
particles - better
incorporation to the
liquid

Partículas de polvo
pequeñas: mejor
incorporación al líquido



Stable - doesn't
suffer contraction
Estable - no sufre
contracción



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

1 x 12g flask of PULP FILL powder
+ 1 x 10ml flask of PULP FILL liquid.
1 x 12g frasco de PULP FILL polvo
+ 1 x 10ml frasco de PULP FILL líquido.

•INFORMATION
•INFORMACIONES





N-RICKERT KIT

Endodontic Cement

Cemento para Endodoncia

- Resin presence - improves mixing characteristics;
- High adhesiveness and penetration - great flow;
- High radiopacity - presence of silver;
- Antibacterial action - Eugenol, Thymol and Silver.
- Presencia de resina - mejora las características de mezcla;
- Alta adhesividad y penetración - gran flujo;
- Elevada radiopacidad - presencia de la plata;
- Acción antibacteriana - Eugenol, Timol y Plata.



Contains
precipitated silver
Contiene plata
precipitada



Greater stability
Excelente estabilidad

PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

- 1 x 10g flask of N-RICKERT powder
- + 1 x 10ml flask of N-RICKERT liquid.
- 1 x 10g frasco de N-RICKERT polvo
- + 1 x 10ml frasco de N-RICKERT líquido.



•INFORMATION
•INFORMACIONES



EUCALIPTOL

Gutta-Percha Solvent

Disolvente de Gutapercha

- Used as a solvent for gutta-percha cones, to aid in root canal cleaning when endodontic retreatment is necessary;
- Based on Eucalyptus essential oil;
- Aromatic odor, camphorous.
- Utilizado como solvente de los conos de gutapercha, para auxiliar la desobstrucción de canales radiculares, cuando el retratamiento endodóntico es necesario;
- A base de aceite esencial de Eucalipto;
- Olor aromático, canforáceo.



Aromatic smell
Olor aromático



Powerful gutta-
percha solvent
Potente disolvente de
gutapercha



•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

- 1 x 10ml flask of EUCALIPTOL.
- 1 x 10ml frasco de EUCALIPTOL.

CITROL

Gutta-Percha Solvent

Disolvente de Gutapercha

- Used as a solvent for gutta-percha cones, to aid in root canal cleaning when endodontic retreatment is necessary.
- Utilizado como solvente de los conos de gutapercha, para auxiliar la desobstrucción de canales radiculares, cuando el retratamiento endodóntico es necesario.



Oil based from the
peel of the orange
A base del aceite de la
corteza de la naranja



Harmless to adjacent
tissues and teeth
structure
Inocuo a los tejidos
adyacentes y a la
estructura dental



Powerful gutta-
percha solvent
Excelente capacidad
de disolver la
gutapercha



Non-toxic
Non tóxico



Pleasant orange smell
Olor agradable a naranja



Fast and effective action
Acción rápida y efectiva



•INFORMATION
•INFORMACIONES



PRESENTATION: PRESENTACIÓN:

- 1 x 10ml flask of CITROL.
- 1 x 10ml frasco de CITROL.

biodinâmica[®]
respect for you

📍 Rua Ronat Walter Sodré, 4350 | Pq. Ind. IV | 86200-000 | Ibiporã - PR - Brasil

✉ SAC - Customer Service | sac@biodinamica.com.br

☎ Tel: +55 43 3178-7000 | Fax: +55 43 3178-7099 | 🌐 www.biodinamica.com.br

📱 /biodinamica | 🐦 @biodinamicabr | 📷 @biodinamicabrasil | 🏠 biodinâmica